

Check list per la gestione del campione

1


Prima della raccolta

Controllo della documentazione da allegare al campione

- **Compilare Consenso informato**
- **Compilare Test Request Form online al link genilam.genomagroup.com**
- **Allegare eventuale documentazione sulla storia clinica del paziente**


2.1

Aprire la busta (Fig. A). Tenere il tubo di plastica con una mano e usando il pollice, spingere la parte alta del tappo per facilitare l'apertura (Fig. B). Inserire il tampone nel cavo orale del paziente, sopra la lingua, e inumidirlo di saliva. Far chiudere al paziente la bocca e tenere il tampone in posizione per 10 secondi (Fig. C).

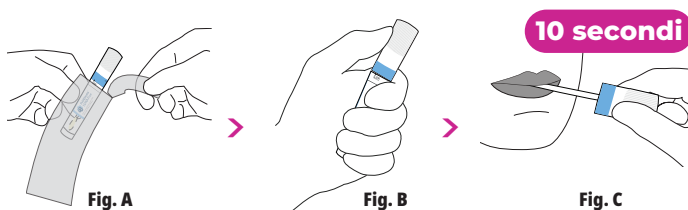

2.3

Ripetere il passaggio 2.2 sul lato opposto del cavo orale.

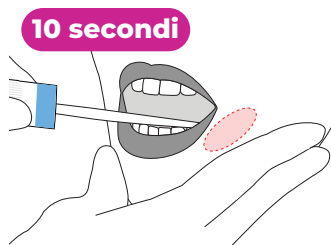


2

Raccolta del campione

Indossare i guanti prima di effettuare il prelievo. Assicurarsi che il paziente non abbia mangiato, bevuto (eccetto acqua), fumato, lavato i denti e masticato chewing gum nell'ora precedente il prelievo del campione


2.2

Per migliorare il prelievo, con l'indice e il medio, premere il tampone contro l'interno della guancia. Spostare il tampone verso un lato del cavo orale e strofinare energicamente 10 volte contro l'interno della guancia, vicino alla parete gengivale.

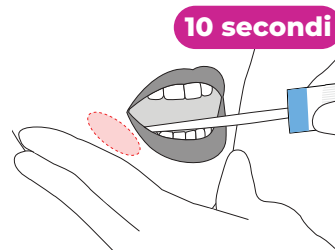

2.4

Dopo il prelievo, reinsertire il tampone nel tubo in plastica e chiudere saldamente.

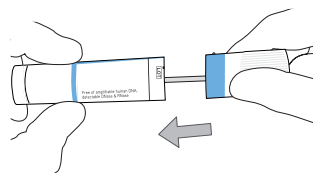



3

Prima della spedizione

Etichettatura delle provette con i dati del paziente

- Nome e cognome del paziente
- Data di nascita del paziente
- Data e ora del prelievo

4

Preparazione della spedizione

Inserire la provetta con il tampone all'interno del box in cartone in dotazione per il trasporto

- Il campione si conserva e viaggia a T° Ambiente
- Chiudere con cura la scatola
- Spedire il campione appena possibile

5

Spedizione

Preparazione del pacco e ritiro del corriere

- Inserire nella scatola la documentazione compilata (vedi step 1) e il campione
- Inserire la scatola nella busta del corriere (in dotazione) e sigillare
- Richiedere tramite il portale al link genilam.genomagroup.com il ritiro del campione compilando tutti i campi richiesti e stampare la lettera di vettura ricevuta via mail (lettera di vettura non necessaria per il comune di Roma e Milano)
- Inserire la lettera di vettura nell'apposita custodia trasparente sulla busta del corriere (lettera di vettura non necessaria per il comune di Roma e Milano)
- Attendere il ritiro del campione nelle fasce orarie indicate

